

HEXAWOL® Fix Schnelldesinfektion

VAH, DVG und IHO gelistet

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. **HEXAWOL® Fix** ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen, da parfüm- und aldehydfrei. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von **HEXAWOL® Fix** nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406).

Inhaltsstoffe:

In 100 g Lösung sind enthalten als wirksamer Bestandteil: 45,0 g Ethanol. Parfümfrei, keine auf der Fläche verbleibenden Inhaltsstoffe.

Anwendung:

Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten. **Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Nicht für alkoholempfindliche Materialien wie Acrylglas geeignet.

Dosierung:

bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH-Richtlinien/EN 13697
 Sprühdesinfektion: 2 Min.*
 Wischdesinfektion: 1 Min.*
 (*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)

Tuberkulose-Bakterien (M. terrae) gern. EN 14348 30 Sek.
wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vakzinia,
BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-, Grippe-Viren
 (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV-Leitlinie) 30 Sek.

Noro-Viren (MNV, Murines Noro-Virus) gem. EN 14476 1 Min.

Physikalische Angaben:

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 7

Art.-Nr. / Verpackung:


4267 1-l-Keulenflasche
 4268 Sprühkopf

**Produkt-Code:
nach GISBAU
BAUA Reg.-Nr.:**

GU 50
 N-67176
 N-67177

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kennzeichnung:

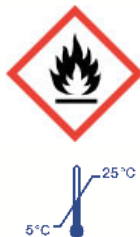

ACHTUNG

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.